

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte celý návod na použitie, oboznámte sa s dôležitými bezpečnostnými opatreniami a detailnými inštrukciami na používanie prístroja. Návod na použitie uložte na bezpečnom mieste pre prípad jeho použitia v budúcnosti. V prípade predaja prístroja nezabudnite návod odovzdať novému majiteľovi spoločne s prístrojom a jeho príslušenstvom.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

DÔLEŽITÉ!!!

Použitie analyzátoru alkoholu bezprostredne alebo do 15 minút po použití alkoholického nápoja môže viesť k poškodeniu detektnej sondy a hrozí nepresnosť ďalších meraní. Prístroj je týmto vyňatý zo záručných podmienok pre neoborné zaobchádzanie.

- Testovanie nevykonávajte v súlom vetre alebo v uzavorennej miestnosti, ktorá je silne zafajčená alebo obsahuje alkoholové výparы.
- Ak sa na displeji objavi symbol vybitých batérii, nahradte ich novými.
- Do náustku nevdychujte dym, jedlo alebo tekutiny.
- Prístroj používajte iba v prostredí s teplotami +10 až +40 °C. Používanie v prostredí mimo stanovených medzi môže viesť k poškodeniu prístroja a nepresnému výsledkom testovania.
- Úroveň alkoholu v dychu závisí od mnohých faktorov a v čase sa mení. Úroveň sa teda môže meniť už niekoľko minút po pôvodnom meraní.
- Výsledky merania tohto prístroja nie je možné použiť v súlom procese ako dôkazový materiál.
- Údaje z tohto prístroja sú iba informatívne. Odporúčame ho nepoužívať na rozhodovanie o schopnosti vykonávať akúkoľvek zodpovednú činnosť. Niekoľko faktorov (napr. zvyšky prírodného plynu, dym i nežiaduci dych) môžu ovplyvniť výšku nameranej hodnoty.
- Nedovolte sebe ani nikomu inému, aby po požití alkoholu viedol vozidlo. Vždy si obstarajte náhradného vodiča alebo použite alternatívny dopravný prostriedok, ak ste požili alkohol.
- Predajca ani výrobca nie je zodpovedný za vzniknuté škody použitím tohto prístroja.

NIKY NEPITE ALKOHOL, AK SA CHYSTÁTE VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLO!!!

Upozornenie: Po roku používania prístroja odporúčame nechať skontrolovať presnosť jeho merania. Pri častejšom používaní môže byť už životnosť prístroja vyčerpaná a výsledky merania nemusia byť presné.

Popis prístroja



Vloženie batérií

1. Odoberete kryt priestoru pre batérie.
2. Vložte 3 alkalické batérie typu AAA podľa polarizácie uvedenej v priestore na batérie.
3. Nasadte kryt späť na miesto.
4. Po vložení batérií sa automaticky spustí samočistenie. Indikátor samočistenia sa rozblíká a na displeji sa bude odpočítávať čas.
5. Po dokončení funkcie samočistenia budete môcť prístroj používať.

Poznámka:

Vyberte batérie, pokiaľ budete prístroj ukladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.

Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod. Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby prístroj správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nehadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v prístroji.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vyečenia batérií.
- Ak prístroj nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzková účinnosť, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, prístroj dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Použitie

1. Po vložení batérií sa na displeji zobrazí indikátor „AUTO CLEANING“ (automatické čistenie) a začne sa odpočítavať čas automatického čistenia. Sťačením tlačidla ON/OFF prerušíte proces automatického čistenia.
2. Pred použitím je potrebné, aby ste si vypláchli ústa čistou vodou. Počas aspoň 5 minút pred použitím nefajčíte ani nepite alkoholické nápoje.
3. Krátko sťačte tlačidlo START na zapnutie prístroja. Senzor predhriatia sa aktivuje. Na displeji bude blikat „WAIT“ (Čakajte) počas asi 9 sekúnd. Potom sa „PH“ a „Sta“ budú striedavo zobrazovať na displeji a displej začne odpočítavať čas predhrievania.
4. Do vstupného otvoru nad LCD displejom vložte slamku alebo fúkaciu trubičku.

Dôležité

Kedže sa snímač potrebuje zahriať, vyčkajte, až prebehne proces predhriatia.

5. Hned ako je odpočítavanie na konci, na displeji sa zobrazí „READY“ (pripravený) a zaznie zvukový signál. Prístroj je teraz pripravený na test.
6. Sťačte a podržte tlačidlo „BLOW“. Na displeji sa rozsvieti kontrolka „Blow“. Súčasne je potrebné fúknut do trubičky. Fúkanie do trubičky musí byť konštantné a musí trvať približne 6 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál a nezobrazí sa hodnota merania.
 - Nameraná hodnota nižšia než 0,2 % sa zobrazí ako „LO“ (nízka hodnota).
 - Nameraná hodnota medzi 0,2 % – 1,5 % sa zobrazí na displeji.
 - Nameraná hodnota vyššia než 1,5 % – rozblíká sa na displeji „HI“ (vysoká hodnota) & „NO DRIVING“ (Zákaz ťoférovania).

Varovné signály

Bezpečná hodnota	Nameraná hodnota nižšia než 0,2 % sa na displeji zobrazí ako „LO“ (nízka hodnota).
Nízka indikujúca hodnota	Nameraná hodnota medzi nízkou hodnotou (>0,2 %) a alarmujúcou hodnotou (Varovná úroveň) sa na displeji zobrazí ako koncentrovaná hodnota alkoholu.
Alarmujúca hodnota	Nameraná hodnota sa rovná alebo je vyššia než alarmujúca koncentrovaná hodnota. Zaznie zvuková signalizácia a súčasne sa na displeji rozblíká „NO DRIVING“ (Zákaz šoférovania) počas asi 25 sekúnd. Zobrazí sa nameraná úroveň a hlásenie „NO DRIVING“ (Zákaz šoférovania) zostane svietiť na displeji. Ak je nameraná hodnota vyššia než 1,5 %, na displeji sa rozblíká „NO DRIVING“ (Zákaz šoférovania) a „HI“ (vysoká hodnota). Stlačte tlačidlo MODE na zrušenie zvukovej signalizácie. JE ZAKÁZANÉ ŠOFEROVÁŤ, ak je prekročená nízka alarmujúca hodnota.

Dôležité upozornenia

- Aby ste zaistili presné meranie prístroja, je potrebné vykonávať tzv. samočistenie, ak ste nepoužili prístroj viac ako 2 týždne (obzvlášť pred prvým použitím). Proces samočistenia začnete vybratím batérií a ich opäťovným vložením a zapnutím prístroja. Indikátor „AUTO CLEANING“ sa rozblíká. Proces samočistenia trvá približne 5 minút a počas tohto času bude displej čas odpočítavat. V poslednej minúte samočistenia zaznie zvukový signál. Prístroj sa automaticky vypne po 1 minúte a proces samočistenia bude dokončený. Pred testom sa uistite, že žiadny zvyškový alkohol nezostal vnútri prístroja.
- Stlačením tlačidla ON/OFF ukončíte proces automatického čistenia.
- Po 4 opakovanych testoch nechajte prístroj v pokoji asi 2 minúty.
- Ak sa na displeji rozblíká „Err“ počas asi 5 sekúnd, môže to znamenať nesprávne zaobchádzanie:
- Počas merania ste nestlačili a nedržali tlačidlo BLOW.
- Ked nespustíte test do 8 sekúnd od nápisu „READY“.
- Ak prístroj nebude používať, uložte ho na suchom mieste.
- Ak sa rozblíká indikátor stavu nízkej batérie, nie je meranie presné a je potrebné batérie bezodkladne vymeniť.
- Ak rozdiel medzi 2 po sebe idúcimi meraniami je väčší než 0,1 %, musíte meranie opakovať.
- Aby ste zaistili presné meranie, uistite sa, že v prístroji nezostali žiadne zvyšky alkoholu. Vyčkajte, až sa na displeji zobrazí LOW. Tento údaj zobrazíte opäťovným stlačením tlačidla START. Podržte BLOW a nechajte do vstupného otvoru nasáť čerstvý vzduch. Pripadne môžete zvyšky alkoholu odstrániť opatrnným zatrasením prístroja.
- 0,5 ‰ = 0,05 %

Technické špecifikácie

Rozsah merania	0,2 - 1,5 %
Batéria	3x 1,5 V alkalické batérie typu AAA
Displej	Digitálny LCD displej s dvojfarebným podsvietením
Automatické vypnutie	2 minúty
Dĺžka testu	≥ 6 sekúnd
Cas prípravu testu	30 sekúnd
Rozmery (v x š x h)	107 x 45 x 25 mm
Hmotnosť	Cca 48 g (bez batérií)
Alarmujúca hodnota kalibrácie	0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 %
Príslušenstvo	3 fúkacie trubičky

Vyššie uvedené údaje sa môžu bez udania dôvodu zmeniť.

Nezabudnite, že hodnotu merania môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov, ako napr. znečistenie ovzdušia plyny, dym a rôzne zápachy v ústach. Preto hodnotu merania považujte za orientačnú.
Výrobca ani predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť plynúcu z používania tohto prístroja.

Upozornenie! Použitie analyzátoru alkoholu bezprostredne alebo do 15 minút po požití alkoholických nápojov môže viesť k poškodeniu detekčnej sondy, hrozí nepresnosť ďalších meraní. Prístroj je týmto vyňatý zo záručných podmienok pre neoborné zaobchádzanie.



Likvidácia použitých batérií

Použité batérie odložte na zberné miesta na to určené. Riadte sa predpismi platnými vo vašej krajine.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektrotechnické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhatе prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikácií sa môžu vykonávať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.