

Tvárová sauna a inhalátor

erava

FI-120

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

FI-120

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru so zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na typovom štítku zariadenia.
- Zariadenie nezapájajte ani neodpájajte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode.
- Skôr než zariadenie zapojíte alebo odpojíte, uistite sa, že otočný ovládač je v polohe [0] VYPNUTÝ.
- NIKDY zariadenie neponárajte celkom do vody alebo iných tekutín za účelom čistenia či inými účelmi.
- NIKDY nepoužívajte zariadenie bez vody.
- Do zariadenia nekladajte žiadne iné predmety. Používajte ho len v sede.
- NENECHÁVEJTE zariadenie zapnuté, ak ho nepoužívate, alebo sa ho nechystáte použiť.
- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE, ak je sieťová šnúra alebo zástrčka poškodená. Ak zariadenie nepracuje správne, spadlo alebo je akokoľvek poškodené, doručte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ho preveriť a opraviť.
- NEŤHAJTE za sieťovú šnúru.
- Ak zariadenie používajú deti a choré osoby, alebo je v ich blízkosti, je nutný STÁLY DOHĽAD.
- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE počas spánku, alebo ak ste ospalí.
- Zariadenie POUŽÍVAJTE LEN na plochom, rovnom a stabilnom povrchu v miestnosti. Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku.
- Ak cítite pri používaní nepohodlie, alebo používanie zariadenia vyvolalo bolesť či podráždenie pokožky tváre, prestaňte zariadenie používať. Zariadenie nikdy nepoužívajte na opuchnutú alebo zapálenú pokožku tváre, alebo ak máte alergickú kožnú vyrážku. Najprv sa obráťte na svojho lekára.
- Zariadenie má horúci povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.

- Deti vyžadujú dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Používajte zariadenie len na účely uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nevystavujte prudkým nárazom ani otrasom.
- Zariadenie musí byť vždy v horizontálnej polohe a na suchom mieste.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov.
- Nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov zariadenia.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa doporučá nainštalovať do elektrického okruhu, napájacieho kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom, neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho odpojte z sieťovej zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

Technické údaje

Napájanie:	230 V~ 50 Hz
Príkion:	120 W
Rozmery (š x v x h):	185 x 270 x 165 mm
Hmotnosť:	0,4 kg

Právo na zmeny vyhradené!



Informácia

Starajte sa o svoju unavenú pleť, najmä ak pociťujete na svojej tvári príznaky starnutia, úbytok tuku a živín z lícných kostí, brady a pier, a naopak, ich hromadenie na krku.

Zariadenie je určené na intenzívnu starostlivosť o pleť a inhaláciu.

- Uvoľňuje svaly a zmierňuje bolesť.
- Vykonáva hĺbkovú masáž pokožky.
- Zmierňuje únavu a stres.
- Dodáva Vašej pleti mladistvý vzhľad.
- Zmierňuje stres a únavu.
- Otvára póry pre efektívnejšie čistenie a hydratuje pleť.
- K dispozícii je aj parný nástavec pre nos na inhalovanie.
- Jednoducho sa čistí.
- Umožňuje použiť aj arómu (vonné prísady).

Správne použitie má za následok zvýšenie krvného obehu v pokožke tváre, čo sa prejavuje príjemným a dlhodobým pocitom tepla (vzrast teploty pokožky).

Tvárová sauna v pravidelných intervaloch zlepšuje krvný obeh v tvárovej pokožke a uvoľňuje nosné a čelové dutiny.

Po tom čo, nastavíte teplotu vody na ovládacom paneli zariadenia, udržuje ohrievací systém s kontrolou teploty požadovanú teplotu v zariadení.

Popis častí



- 1 Maska na tvár
- 2 Nástavec na nos pre inhaláciu
- 3 Posuvný regulátor pary
- 4 Odmerka
- 5 Otočný ovládač výkonu a vypínač (0, 1, 2)
- 6 Miska na vodu (vnútri zariadenia)
- 7 Indikátor napájania
- 8 Vyhrievacia základňa

Umiestnenie

Vybalte zariadenie, odstráňte všetok obalový materiál a postavte ho na rovný, pevný a tvrdý povrch.

Nekladte ho napríklad na koberec.

Používanie zariadenia

- 1 Postavte vyhrievaciu základňu na rovný, nešmyklavý a voči vodoodolný povrch.
- 2 Zariadenie je možné používať, len ak je naplnené vodou.
Naplnite misku teplou vodou podľa potreby pomocou dodávanej odmerky.
Ak chcete inhalovať nejaký roztok, nakvapkajte inhalačné kvapky do vody, prípadne do vody pridajte bylinky.
Nepĺňte vodu viac než po značku „MAX“, označenú na vnútornej zadnej strane misky na vodu.

Varovanie


Nikdy nepĺňte viac vody než po značku „MAX“ v miske na vodu.

Inak by sa mohlo zariadenie prepliť a voda by sa dostala do jeho vnútra. Mohli by ste tým zariadenie poškodiť a znefunkčnúť.

- 3 Uistite sa, že je zariadenie VYPNUTÉ (otočný ovládač v polohe **0**).
Potom zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky 230 V~ 50 Hz.
- 4 Nasadte tvárovú masku na vyhrievaciu základňu:
Výčnelky na tvárovej maske musia zapadnúť do drážok na základni.
Potom otočte tvárovú masku doľava, aby sa pevne zaistila na vyhrievacej základni.
Ak chcete používať nástavec na nos pre inhaláciu, nasadte ho priamo na základňu.
- 5 Otočením ovládača zvolte požadovaný výhrevný režim **1** alebo **2**. V polohe **1** má zariadenie príkon 70 W a v polohe **2** má príkon 120 W.
- 6 Otočením regulátora pary na tvárovej maske úplne doprava zablokujte otvory pre paru, aby sa para najskôr naakumulovala.

- 7 Keď sa začne voda odparovať, pohodlne sa posadíte s tvárou nad zariadenie a pomaly pritlačte tvár na tvárovú masku. Zatvorte oči a uvoľnite sa.

Regulátor pary pomaly posúvajte doľava, aby sa odkrývali otvory pre paru a nastavte si želanú intenzitu pary.

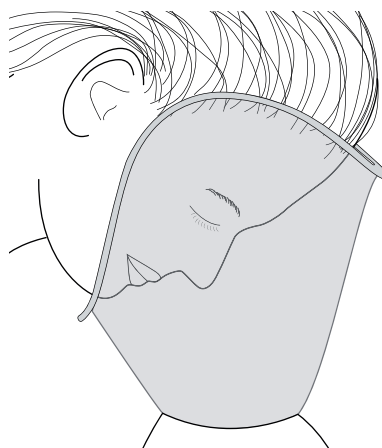

- 8 Inhalujte alebo si len vychutnávajte teplú paru na pokožke.

Pri používaní tvárovej sauny sa Vaša pokožka optimálne pripraví na ďalšie ošetrovanie, ako je napríklad hĺbkové čistenie, zvlhčovanie, tvárové masky a pod. Para oživí pokožku, otvorí póry, takže nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

Ak by ste sa necítili dobre, alebo by Vám bola para nepríjemná, odtiahnite si tvár trochu ďalej od masky na tvár alebo znížte intenzitu pary regulátorom. Ak bude nepríjemný pocit pretrvávať, ukončite používanie zariadenia.

Upozornenie:

Pri nasledujúcich ochoreniach tvárovú masku radšej nepoužívajte:

- pri zápaloch pokožky
- pri sčervenaní pokožky
- pri opuchoch v tvárovej oblasti
- pri srdcových ochoreniach
- pri problémoch dýchania
- pri poraneniach v tvárovej oblasti
- pri ekzémoch
- pri lupienke a psoriáze
- ak ste tehotná alebo máte iné zdravotné problémy

Pred používaním pri uvedených problémoch určite požiadajte o radu lekára.

7 Keď sa voda z misky na vodu odparí, zariadenie sa automaticky vypne. Keď chcete zariadenie vypnúť skôr, otočte otočný ovládač do polohy **0**, aby zhasol indikátor napájania.

Upozornenie:

Po 30 minútach sa zariadenie automaticky vypne, aj keď je ešte voda v miske na vodu.

8 Po vypnutí odpojte zariadenie z elektrickej siete, zložte tvárovú masku, vylejte prípadnú zvyšnú vodu z misky a nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie uskladnite až po jeho vychladnutí.

Tipy

Parné ošetrovanie mastnej pleti

Naparujte si tvár cca 10 až 15 minút.

Potom si vyčistite tvár vodou a univerzálnym čistiacim prostriedkom na pokožku.

Potom natrite tvár vrstvou pleťového mlieka alebo peelingovou maskou.

Nakoniec použite tvárovú emulziu.

Parné ošetrovanie suchej pleti

Naparujte si tvár cca 5 až 10 minút.

Potom si vyčistite tvár vodou.

Nakoniec použite masku z bieliaceho krému alebo výživovú emulziu.

Parné ošetrovanie citlivej pleti

Naparujte si tvár cca 10 minút.

Potom si vyčistite tvár vodou.

Nakoniec použite prípravky na citlivú pokožku (krém, výživovú masku a pod.).

Parné ošetrovanie pleti náchylnej na tvorbu uhrov a vyrážok

Naparujte si tvár cca 5 až 18 minút.

Pomocou tampónu na odstraňovanie mejkapu utrite z tváre pot a kožný maz.

Potom opatrne prstami vytlačte uhry alebo vyrážky.

Po vytlačení ošetríte pleť univerzálnym čistiacim prostriedkom na pokožku, tinktúrou na pokožku alebo liečivou emulziou.

Čistenie a údržba

Ide o zariadenie určené k starostlivosti o telo, nielen o jednoduchú nádobu. Pred použitím si umyte tvár a používajte čistú vodu. Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Postup čistenia

Čistenie základne

Po použití z misky zariadenia vylejte vodu a misku a základňu čistite len suchou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh, benzín alebo riedidlo. Zariadenie nikdy neponárajte celé do vody. Nakoniec zariadenie opláchnite a osušte.

Čistenie tvárovej masky, násady na nos pre inhaláciu a odmerky

Tieto diely po zložení zo zariadenia vyčistite v slabom roztoku čistiaceho saponátu. Potom všetko opláchnite čistou vodou a nechajte celkom voľne vyschnúť na vzduchu.

Miska na vodu

Keď sa začnú vytvárať vápenné usadeniny (vodný kameň) v miske, vyčistite misku na vodu bežne dostupným odvápnovačom, vhodným aj pre hliník. Riadte sa pri tom návodom na používanie odvápnovača.

Skladovanie

Zariadenie odpojte z elektrickej siete. Skontrolujte, či je vychladnuté a nenachádza sa v ňom voda. Potom ho uskladnite na čisté a suché miesto. Pred skladovaním zariadenia omotajte sieťovú šnúru okolo základne.

Producent

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízkovoltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!